


Fiche pratique : Vue éclatée Equinoxe inversée

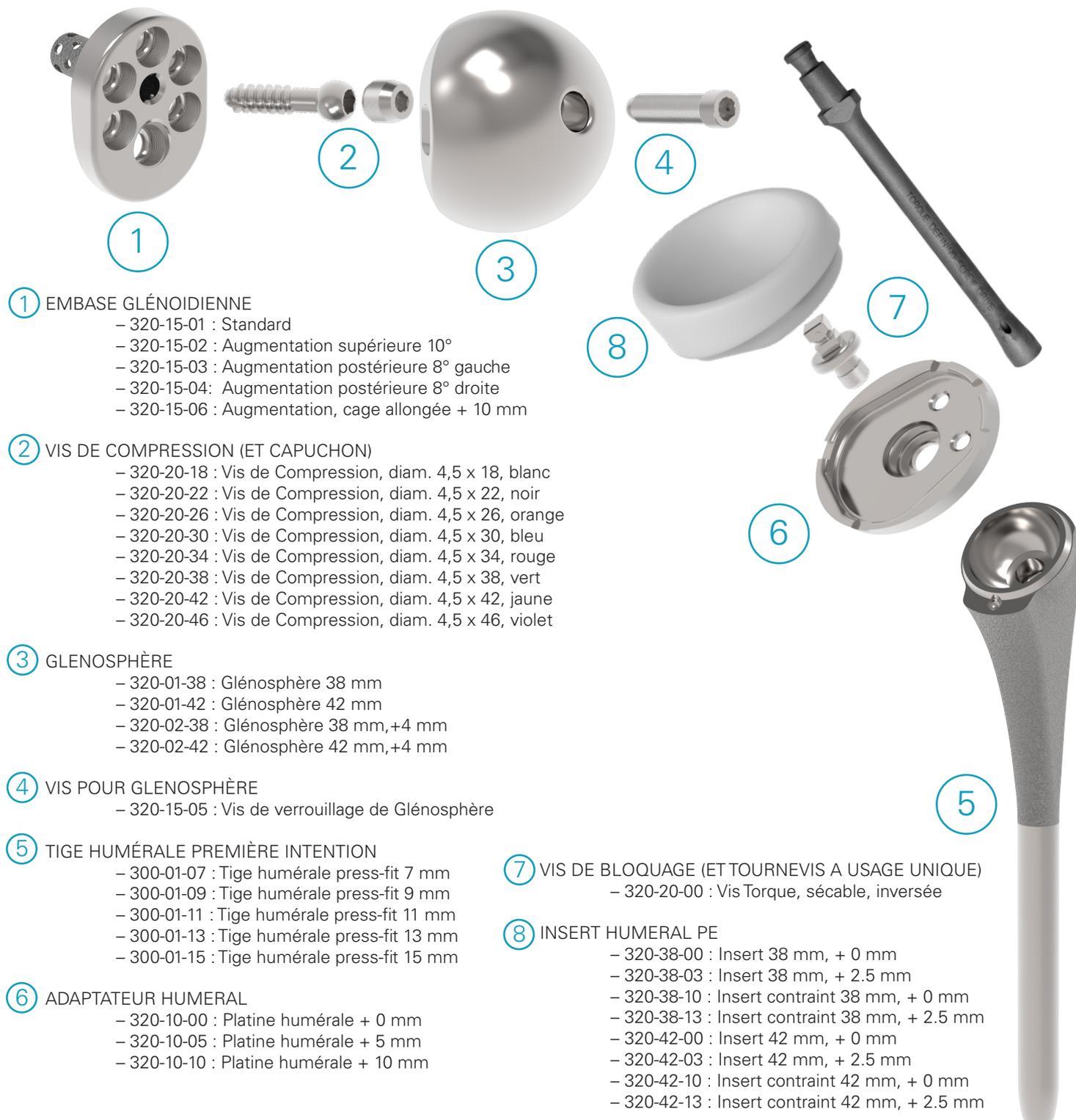

① EMBASE GLÉNOIDIENNE

- 320-15-01 : Standard
- 320-15-02 : Augmentation supérieure 10°
- 320-15-03 : Augmentation postérieure 8° gauche
- 320-15-04 : Augmentation postérieure 8° droite
- 320-15-06 : Augmentation, cage allongée + 10 mm

② VIS DE COMPRESSION (ET CAPUCHON)

- 320-20-18 : Vis de Compression, diam. 4,5 x 18, blanc
- 320-20-22 : Vis de Compression, diam. 4,5 x 22, noir
- 320-20-26 : Vis de Compression, diam. 4,5 x 26, orange
- 320-20-30 : Vis de Compression, diam. 4,5 x 30, bleu
- 320-20-34 : Vis de Compression, diam. 4,5 x 34, rouge
- 320-20-38 : Vis de Compression, diam. 4,5 x 38, vert
- 320-20-42 : Vis de Compression, diam. 4,5 x 42, jaune
- 320-20-46 : Vis de Compression, diam. 4,5 x 46, violet

③ GLENOSPHERE

- 320-01-38 : Glénosphère 38 mm
- 320-01-42 : Glénosphère 42 mm
- 320-02-38 : Glénosphère 38 mm,+4 mm
- 320-02-42 : Glénosphère 42 mm,+4 mm

④ VIS POUR GLENOSPHERE

- 320-15-05 : Vis de verrouillage de Glénosphère

⑤ TIGE HUMÉRALE PREMIÈRE INTENTION

- 300-01-07 : Tige humérale press-fit 7 mm
- 300-01-09 : Tige humérale press-fit 9 mm
- 300-01-11 : Tige humérale press-fit 11 mm
- 300-01-13 : Tige humérale press-fit 13 mm
- 300-01-15 : Tige humérale press-fit 15 mm

⑥ ADAPTATEUR HUMERAL

- 320-10-00 : Platine humérale + 0 mm
- 320-10-05 : Platine humérale + 5 mm
- 320-10-10 : Platine humérale + 10 mm

⑦ VIS DE BLOQUAGE (ET TOURNEVIS A USAGE UNIQUE)


- 320-20-00 : Vis Torque, sécable, inversée

⑧ INSERT HUMERAL PE


- 320-38-00 : Insert 38 mm, + 0 mm
- 320-38-03 : Insert 38 mm, + 2.5 mm
- 320-38-10 : Insert contraint 38 mm, + 0 mm
- 320-38-13 : Insert contraint 38 mm, + 2.5 mm
- 320-42-00 : Insert 42 mm, + 0 mm
- 320-42-03 : Insert 42 mm, + 2.5 mm
- 320-42-10 : Insert contraint 42 mm, + 0 mm
- 320-42-13 : Insert contraint 42 mm, + 2.5 mm

Fiche pratique : Préparation des implants dans le déroulé de l'intervention

1/ PRÉPARER LES DEUX IMPLANTS SUIVANTS (CES 2 RÉFÉRENCES SONT SYSTÉMATIQUEMENT UTILISÉES LORS DE CHAQUE PTEI) :

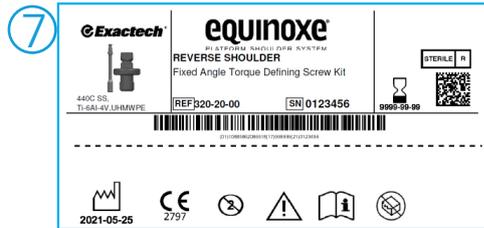


2/ AU DÉBUT DE LA PRÉPARATION DE LA GLÈNE, DEMANDER AU CHIRURGIEN LE TYPE D'EMBASE ET SERVIR L'UNE DES RÉFÉRENCES :

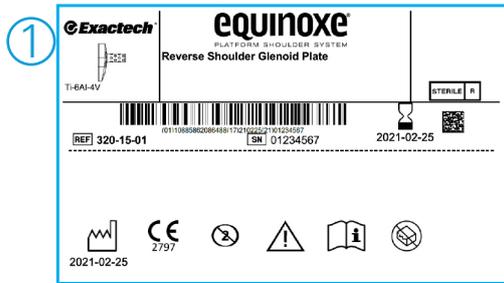

3/ LE CHIRURGIEN MÈCHE POUR LES VIS PÉRIPHÉRIQUES, SE PRÉPARER À SERVIR EN FONCTION DES COULEURS :



4/ SERVIR LA GLENOSPHERE 38 OU 42 MM :

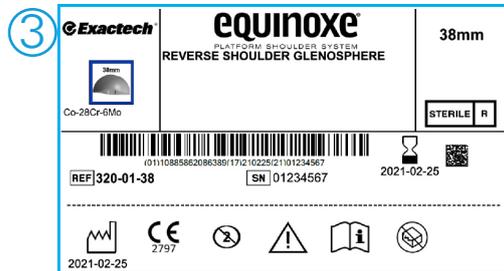

5/ SUR L'HUMÉRUS, IL RESTE À SERVIR DANS L'ORDRE LES IMPLANTS SUIVANTS EN FIN D'INTERVENTION :

